

# Joëlette

## Manual



**Joëlette** *and Co*  
**by Ferriol-Matrat**

[www.joëletteandco.com](http://www.joëletteandco.com)

## INNEHÅLL

Kapitel	Rubrik	Sidnr.
<b>1</b>	<b>INTRODUKTION</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>HUR NI ANVÄNDER JOËLETTE</b>	<b>4</b>
2.1	Teamet	4
2.2	Bakre guide	4
2.3	Främre guide	6
2.4	Tredje guide	7
2.5	Passagerare	7
2.6	Nyckelpunkter	8
<b>3</b>	<b>SKADOR ELLER SLITAGE</b>	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>KÖRTEKNIK</b>	<b>9</b>
4.1	Uppförsbacke	9
4.2	Nedförsbacke	9
4.3	Svåra hinder	10
4.4	Kurvor	11
4.5	Sidolutning	11
<b>5</b>	<b>UPPSITTNING</b>	<b>12</b>
5.1	Säkerhet och stöd	13
5.2	Bekvämlighet	14
<b>6</b>	<b>START OCH STOPP</b>	<b>15</b>
6.1	Upp på hjul	15
6.2	Ned på stödet	17
<b>7</b>	<b>SÄKERHET</b>	<b>18</b>
7.1	Val av stigar	18
7.2	Teamet	18
7.3	Förbered vandringen	18
7.4	Försäkring	18
7.5	Packning	18
7.6	Under vandringen	19
<b>8</b>	<b>MONTAGE AV JOËLETTE</b>	<b>20</b>
<b>9</b>	<b>TRANSPORTVÄSKA</b>	<b>23</b>
<b>10</b>	<b>UNDERHÅLL</b>	<b>24</b>
10.1	Rengöring	24
10.2	Desinfektion	24
<b>11</b>	<b>INSPEKTION</b>	<b>25</b>
11.1	Före varje användning	25
11.2	Återkommande	26
<b>12</b>	<b>LÅNGTIDSFÖRVARING</b>	<b>26</b>
<b>13</b>	<b>TEKNISKA DATA</b>	<b>27</b>
<b>14</b>	<b>SPRÄNGSKISS</b>	<b>28</b>
<b>15</b>	<b>GARANTI</b>	<b>29</b>

## 1 INTRODUKTION

Vandringsstolen med namnet "Joëlette" är en terränggående hjulstol som gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att delta i vandrings- och löpningsaktiviteter, även på steniga stigar och i tuff terräng.

Tack vare sitt unika hjul- och fjädringssystem öppnas terrängtyper som hittills varit otillgängliga med en klassisk rullstol både på och utanför stigar.

Med handtag både bak och fram hanteras vagnen enkelt av två guider eftersom passagerarens vikt ligger på hjulet.

Från lugna promenader till äventyrliga vandringar och till och med maraton, anpassar Joëlette sig till alla utomhusaktiviteter. Endast den fysiska kapaciteten hos guiderna begränsar användandet av en Joëlette.

Denna manual innehåller viktig information om hanteringen av produkten. För att säkerställa säkerhet vid användning av produkten, läs manualen noggrant och följ alla säkerhetsinstruktioner.

Skador och fel orsakade av att användarmanualen inte följts eller som ett resultat av felaktigt underhåll är undantagna från alla garantier. Försök inte utföra något arbete eller åtgärder som inte beskrivs i denna manual.

Användning av Joëlette sker under guidernas personliga ansvar.

Joëlette följer direktiv 93/42 / ECC om medicinsk utrustning.



## 2 HUR NI ANVÄNDER JOËLETTE

För att säkerställa passagerarens säkerhet bör guiderna vara i god fysisk form.

Ni behöver dock inte vara "professionella" idrottare för att framföra den. Joëlette kan också användas för fridfulla promenader i lugnt tempo eller vandring på enklare stigar.

Att använda en Joëlette kräver en kort introduktion och lite träning. Av detta skäl föreslår vi att ni börjar använda Joëlette i lätt terräng och sedan gradvis ökar svårighetsgraden.

### 2.1 Teamet

Beroende på stigarnas svårighet, guidernas upplevda belastning och passagerarens vikt varierar antalet nödvändiga guider från 2 till 5.

Ett standardteam består av 2 guider, i lätt terräng är detta oftast tillräckligt. Med en tyngre passagerare eller vid brantare terräng är en tredje guide till stor hjälp. Vid längre turer eller vid mycket svår terräng rekommenderas 5 guider.

Varje guide har en speciell funktion enligt dess position. Det är viktigt att alla utför sina specifika uppgifter för att få en trevlig upplevelse och en effektiv vandring.

### 2.2 Bakre guide

Bakre guidens huvuduppgift är att hålla balansen på Joëlette. Detta gäller både i sidled och längsled. Guiden ska vara mycket uppmärksam och omedelbart ingripa och korrigera vid lutning.

Bakre guiden säkerställer att passageraren sitter bekvämt. Passageraren ska sitta plant och något bakåtlutad.

Bakre guiden justerar höjden på handtagen till korrekt position. Detta sker vid behov och alltid i samråd med främre guiden.



**RÄTT** : Lätt böjda armar och handtagen i midjehöjd.





**FEL** : Raka armar ger ingen möjlighet för korrigerig.



**FEL** : Händerna över midjan ger dålig balans och riskerar passagerarens säkerhet.

## 2.2.1 Inställning av handtagens höjd

Stå stilla med Joëletten och se till att balansen är god.

Den främre guiden håller ordentligt i handtagen och hjälper till med balansen.

Bakre guiden håller i ryggstödet med höger hand och justerar höjden med vänster hand.

Handtagens höjd skall anpassas vartefter terrängen ändras under vandringen.

Vid nedförsbackar höjs handtagen och vid uppförsbackar ska de sänkas.

Använd bromsen vid nedförsbackar (höger handtag).

Vid uppförsbackar kan bakre guiden skjuta på med magen mot bandet mellan handtagen.

**Varning:** Justera endast höjden när ni står stilla. Förväxla inte det högra handtaget (broms) med det vänstra handtaget (höjdjustering).

## 2.3 Främre guide

Den främre guiden ansvarar för färdvägen, observerar terrängen framför sig och bestämmer vilken väg teamet ska gå. Guiden uppmärksammar alla hinder och försöker undvika dem. För att kringgå hinder gäller att komma ihåg att hjulet ligger drygt en meter bakom ryggen. Om det inte går att kringgå ett hinder, informeras passageraren och den bakre guiden.

Den främre guiden är Joëlettens "motor", den som ansvarar för dragkraften. Det mest effektiva sättet att dra Joëlette är genom att luta sig lite framåt med händerna på handtagen något bakom ryggen. Vi rekommenderar också användning av dragselen eftersom det är mer effektivt att använda hela kroppen.

Främre guiden ska försöka att inte störa balansen genom plötsliga sidorörelser.

Tät kommunikation med den bakre guiden är viktig för ett säkert framförande av Joëlette.



## 2.4 Tredje guide

Den tredje guiden har varierande uppgifter.

- Ta över från en annan guide om denne skulle bli trött.
- Hjälpa till för säker passage vid krångliga partier och i svår terräng.
- Hjälpa till att dra Joëletten uppför branta backar genom att gå längst fram med extraselen inkopplad.
- Hjälpa till att bromsa Joëletten nedför branta backar genom att gå längst bak med extraselen inkopplad.
- Hjälpa till under svåra passager genom att vara placerad i sidled och skjuta eller dra fordonet vid armstöden. (Se upp för sidobalansen!)
- Ge stöd till de andra när det behövs, t.ex. öppna eller stänga grindar, hjälpa passageraren mm.



## 2.5 Passagerare

Passageraren är i centrum av Joëlette och känner därför varje rörelse!

Passageraren bör berätta för guiderna om han eller hon känner en brist på balans under resan. Utan balans är passageraren inte bekväm, vilket omedelbart bör korrigeras av guiderna.

Det är inte självklart för en funktionshindrad person att vilja åka Joëlette eftersom han eller hon därmed ger upp den autonomi de är vana vid i sin egen rullstol eller hjälpmedel. Passagerarens rörlighet och säkerhet överläts helt på guiderna, vilket kräver tillit.



Även svårt handikappade personer kan använda Joëlette eftersom det finns möjlighet för anpassning av både sits och ryggstöd. Anpassningar som hållare, stöd, kuddar, formskum mm ska provas ut i god tid innan användandet för att garantera funktion och komfort.

Joëlette är tänkt för passagerare upp till 120 kg. Av säkerhetsskäl rekommenderas dock att passageraren inte är tyngre än den bakre guiden.

## 2.6 Nyckelpunkter

### Den främre guiden drar Joëlette

Väljer färdväg och undviker hinder om möjligt.  
Kommunicerar med övriga guider.  
Förutser eventuella problem som kan uppstå.  
Gör sitt bästa för att inte störa balansen i Joëlette.

### Den bakre guiden ansvarar för balansen

Ansvarar för korrekt lutning av Joëlette och ser till att Joëlette är horisontellt balanserad och att passagerarens vikt centreras över hjulet.  
Ansvarar för bromsning i nedförsbackar.

### Den tredje guiden

Stöder och hjälper de andra guiderna under svåra passager.  
Ersätter de andra guiderna i händelse av utmattning.

**Guiderna håller Joëlette i balans och drar eller skjuter den. De bär inte!**

## 3 SKADOR ELLER SLITAGE

Använd bara Joëletten när den är i perfekt skick. Annars kan du utsätta dig själv och andra för risk. Följande lista påstår sig inte vara komplett, den är endast avsedd att visa några av de situationer som kan påverka användbarheten för din Joëlette.

**Du bör omedelbart sluta använda Joëletten om något av nedanstående upptäcks:**

- Skador på bromssystemet
- Skador på säteslåssystemet
- Otillräckligt däcktryck
- Skador på lyftarmarna
- Skador på fotstödet
- Skador på bältet och hållarsystemet
- Vajrar som är skadade, knutna, klämda eller har lossnat
- Saknade låsstift
- Missljud



## 4 KÖRTEKNIK

Följande stycken beskriver tekniken för att framföra Joëlette i olika typer av terräng. Testa er fram genom att börja i lätt terräng och övergå till svårare terräng när ni känner er säkra på att klara av det.

### 4.1 Uppförsbacke

**Den främre guiden** drar Joëletten uppåt och anpassar sitt grepp till övre delen av handtaget.

**Den bakre guiden** justerar lyftarmarnas höjd och balanserar Joëlette så horisontellt som möjligt. Vid behov kan guiden skjuta på med magen mot bandet mellan handtagen.

**Den tredje guiden** hjälper till att dra fram Joëlette genom att placera sig framför den främre guiden med inkopplad dragrem runt midjan.

I kurvor måste dragriktningen anpassas så att båda dragarna riktar kraften åt samma håll. Att dra på detta sätt är effektivast i backar utan hinder och utan starka kurvor.



När en eller flera guider hjälper till genom att placera sig i sidled på passagerarnivå och dra Joëlette med armstöd eller ryggstödet's handtag, måste de jobba i samma riktning som den främre guiden för att inte förstöra balansen som den bakre guiden ger.

I mycket brant terräng kan en **fjärde och femte guide** vara nödvändiga.

### 4.2 Nedförsbacke

**Den bakre guiden** justerar lyftarmarnas höjd och balanserar Joëlette så horisontellt som möjligt.

Hanterar bromsen mjukt och smidigt för att undvika en ryckig nedfart.

Inför mycket långa nedstigningar bör magbandet mellan handtagen tas bort, detta gör att guiden får bättre balans eftersom kroppsvikten hamnar mellan handtagen.

**Säkerställ att passageraren inte är tyngre än den bakre guiden.**



I branta backar kommer lyftarmarna högt upp

**Den främre guiden** anpassar sitt grepp om det nu ganska höga handtaget. Fokuserar på färdvägen och kommunicerar tätt med bakre guiden och följer dennes instruktioner. Undviker att hålla emot Joëlette, den bakre guiden sköter bromsningen. Håller händerna snett bakåt och är medveten om fotstödet bakom sig. Tryck aldrig ner lyftarmarna eftersom Joëletten då kan falla framåt.



Vid svåra branter kan Joëlettes lyftarmar komma över axelhöjd. I dessa fall vänder sig främre guiden mot passageraren och sträcker sina armar så högt som krävs och hjälper de andra guiderna att passera hindret.

## 4.3 Svåra hinder

Det finns många typer av svåra hinder tex. trappsteg, större stenar mm.

Hinder går att passera men det är viktigt att ni planerar och kommunicerar för att alla ska veta vad som görs och vad som förväntas.

Ge en tydlig signal till varandra innan riktigt svåra operationer, till exempel vid lyft.

Var uppmärksam på fotstödet och passagerarens fötter.



Vid behov kan Joëlette lyftas vid armstöden, detta sköts av tredje till femte guiden. Det är viktigt att guiderna står på fast mark för att säkerställa passagerarens säkerhet.

I riktigt svåra lägen kan det bli nödvändigt att placera en kedja av guider både framför och bakom och låta Joëlette passera från ena handen till den andra.

Vid körning i trappor håller guiderna tillbaka Joëlette så att nedstigningen sker på ett smidigt sätt.

#### **4.4 Kurvor**

Försök undvika att svänga Joëlette stillastående, och undvik 90 graders och U-svängar. Om ni inte har något val, meddela övriga guider och sväng sakta och se till att de har tillräckligt med tid att följa dina rörelser.

Vid kurvor på smala stigar måste främre guiden förutse den bakre guidens placering och anpassa sin egen rutt så bakre delen av ekipaget inte hamnar ute i terrängen.

Vid riktigt skarpa kurvor placerar sig guiderna in mellan lyftarmarna för att korta ned ekipaget.

#### **4.5 Sidolutning**

Vid sidolutning ska Joëlette balanseras så att passagerarens vikt förblir centrerad på hjulet.

**Detta är den grundläggande informationen om hur man framför en Joëlette.**

**Nu är det upp till er att börja använda Joëlette i enklare terräng och sedan utvecklas med mer utmanande stigar.**

**Tänk på att passagerarens komfort och säkerhet är i fokus vid alla aktiviteter med Joëlette!**

## 5 UPPSITTNING

På den senaste modellen av Joëlette underlättas överföringen av passageraren eftersom sitsen är på rullstolens standardhöjd.



Säkerställ att Joëlette står stabilt på ett fast underlag.

Guiderna hjälper passageraren att flytta sig till sätet genom att hålla fast både rullstol och Joëlette.

Om passageraren klarar att sätta sig själv, går han eller hon fram till sätet mellan lyftarmarna, vänder sig om och sätter sig. Undvik att trampa på fotstödet eftersom det inte är tänkt att hålla för hela kroppsvikten.

Det är också möjligt att tillfälligt skruva bort ett armstöd för att göra en sidoöverföring från rullstolen till Joëlette.



Om passageraren behöver hjälp, lyfter de två guiderna som står i sidled mot Joëlette honom eller henne in i sätet. Vanligtvis tar de tag under axlarna och håller undan bältet med en hand. Med den andra handen håller de passagerarens ben under knäna och lyfter in i sätet.

Om passageraren befinner sig i ett specialiserat sittsystem behöver kuddarna endast tas bort från sätet och systemet placeras och fixeras på Joëlette.

Se till att du står stabilt när du lyfter passageraren. Böj på knäna vid tunga lyft.

Se till att överföringen är bekväm för passageraren. Annars känner de bäst sitt eget handikapp och kan berätta på vilket sätt du ska gå vidare.




## 5.1 Säkerhet och stöd



Spänn alltid fast säkerhetsbältet.

Passageraren ska använda cykelhjälm.

Vi rekommenderar användning av fyrapunktsbälte

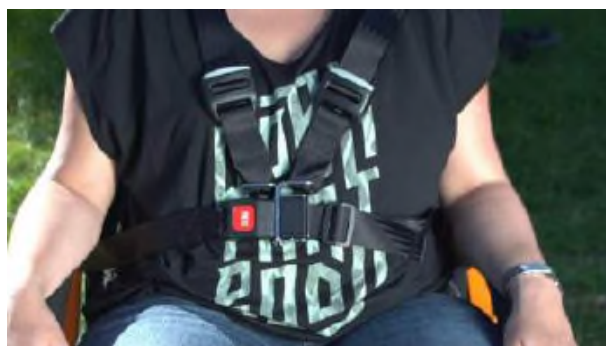

Justera höjden på fotstödet.

Fäll ut låshandtaget mellan fotstöden och flytta upp eller ned. Lås handtaget.

Säkra passagerarens fötter på fotstödet med kardborrebanden.






Justera fotstödens lutning med en 3mm insexnyckel.

Justera nackstödet till rätt höjd (vid öronen) med båda handtagen.



## 5.2 Bekvämlighet

Passagerarens komfort är viktig vid användning av Joëlette och den bör ständigt vara i fokus. Reglera alltid fotstöd och huvudstöd. Ryggstödet är ställbart i tre olika positioner. Observera att inställningen av ryggstödet görs när du monterar Joëlette. Det är dock snabbt gjort att ändra med bara en skruv på vardera sida att flytta.

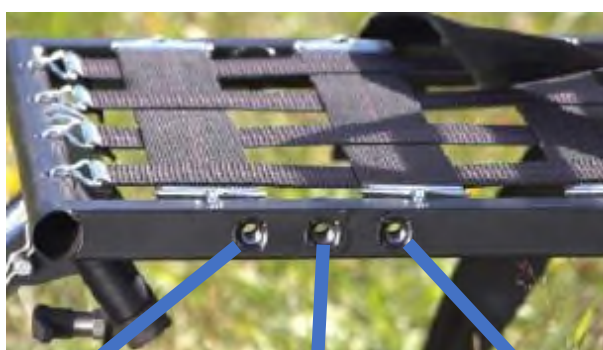

Främre position



Normal position



Bakre position



## 6 START OCH STOPP

Med passageraren på plats är det strax dags för avfärd.

### 6.1 Upp på hjul



**Den främre guiden** placerar sig mellan lyftarmarna, vänd mot passageraren.

Drar ut låshandtaget, under sätet till höger, och vrider det till vertikalt läge (stående).

På detta sätt kommer hjulet att låsas automatiskt innan avfärd.

**Kontrollera alltid att låshandtaget är vertikalt innan färden påbörjas.**

**Den främre guiden**, fortfarande vänd mot passageraren, tar ett ordentligt tag om lyftarmarna.

**Den bakre guiden** står lätt framåtböjd. Justerar höjden på handtaget så att armarna är nästan raka. Håller inne bromsen.



Bromsen skall hållas tills Joëlette är uppe på sitt hjul.

**Den bakre guiden** drar Joëlette rakt bakåt samtidigt som den **främre guiden** skjuter på så att hjulet får kontakt med underlaget.

Målet är att hjulet i en mjuk rörelse ska åka in under sätet och låsas fast.



**Den bakre guiden** kan vid behov sätta höger fot mot stödet på hjulaxeln för att ge bättre fäste för hjulet.





Processen är över när du kan höra ett snäpp som indikerar att hjulet är låst till sätet.

Kontrollera att låshandtaget är i låst läge eller aktivera bromsen försiktigt samtidigt som ni rullar Joëlette framåt för att säkerställa att hjulet är låst.

Nu är det dags att hitta tyngdpunkten och justera höjden på handtagen.

Bakre guiden håller balansen medan främre guiden kopplar på selen och vänder sig om.

## 6.2 Ned på stödet

Efter en lyckad tur i skogen är det nu dags att parkera Joëlette och släppa ur passageraren. Stanna på en plan och fast yta.



Den bakre guiden håller balansen.

Den främre guiden placerar sig mellan lyftarmarna, vänd mot passageraren.

Drar ut låshandtaget, under sätet till höger, och vridet till horisontellt läge (liggande).

Den främre guiden stannar mellan lyftarmarna, vänd mot passageraren och håller uppe balansen.

Den bakre guiden justerar höjden på handtagen för sina utsträckta armar och aktiverar bromsen.

Den bakre guiden håller bromsen inne och skjuter Joëlette rakt framåt samtidigt som främre guiden drar bakåt. Målet är att hjulet i en mjuk rörelse ska åka in bakom sätet.

Den främre guiden håller i lyftarmarna tills stöden är i kontakt med marken.



Guiderna kan nu släppa lyftarmarna och hjälpa passageraren ur Joëletten.

**Två viktiga saker att komma ihåg:**

- För att placera Joëlette på hjul eller på dess stöd: håll **alltid** bromsen inne under hela processen.
- Innan varje avfärd: Kontrollera att låshandtaget är i vertikal position (stående).

## 7 SÄKERHET

Några viktiga saker att tänka på innan ni ger er ut på äventyr med Joëlette.

### 7.1 Val av stigar

Innan ni påbörjar er vandring med Joëlette bör ni kontrollera att rutten är anpassad till Joëlette och teamet. Det finns en risk att hinder som lätt kan övervinnas för en vanlig vandrare kan bli för tekniskt eller fysiskt svåra för Joëlette.

Tro dock inte att bara uppgrusade stigar är tillgängliga. Tvärtom, de flesta stigar är framkomliga!

Ett enkelt och bra sätt att ta reda på om Joëlette kommer att fungera är att testköra leden med mountainbike. Joëlette passerar där en mountainbike kan passera. Svåra stigar med stenar, trädstammar och rötter kräver bara en högre teknisk kompetens och fysisk kondition.

### 7.2 Teamet

Beroende på bland annat ledens svårighet, teamets erfarenhet och passagerarens vikt varierar antalet guider mellan två och fem. Standardteamet består av två guider.

Se till att alla guider fysiskt klarar av att framföra Joëlette.

Underskatta inte att ni behöver en viss nivå av kondition och tekniska färdigheter.

### 7.3 Förbered vandringen

Förbered rutten i förväg.

Välj en rutt eller led som passar er fysiska kapacitet och tekniska färdigheter.

Kontrollera att Joëlette är i gott skick, särskilt mekaniskt.

Kontrollera meteorologiska förhållanden i förväg.

Använd inte Joëlette under åskväder. Metallkonstruktionen kan leda till blixtnedslag.

Observera också att en stig kan bli extremt svår vid nederbörd.

Informera vänner och bekanta om er resplan.

### 7.4 Försäkring

Varje guide måste ha en ansvarsförsäkring för att hantera Joëlette. Användningen av Joëlette kräver vanligtvis inte en specifik försäkring men kan behöva deklarerars till försäkringsbolaget.

Det är ert eget ansvar att kontrollera om ert försäkringsbolag kräver en specifik försäkring för användningen av Joëlette.

### 7.5 Packning

Ta med föremål som är användbara under vandringen. (Första hjälpen, mobiltelefon mm.)

Reparationssats, extra dragsele mm.

Tänk på att passageraren inte rör sig och riskerar att bli kall. Tag med varma kläder, mössa, handskar osv ... Ett paraply, poncho och till och med en filt kan vara till hjälp.

## 7.6 Under vandringen

En cykelhjälm för passageraren.

Bra skor för guiderna.

Säkerställ att Joëletten är ordentligt monterad, särskilt innan svårare vandringar.

Kontrollera bromsarna innan ni går neråt.

Håll alltid Joëlette i balans oavsett vilken typ av terräng ni går på.

De bakre lyftarmarna ska inte vara högre eller lägre än midjan.

Stanna om ni blir trötta. Tänk på att er fysiska förmåga ska vara tillräcklig.

Gå inte för snabbt. Ni måste veta var hjulet är, var ni sätter fötterna och inte halka.

Glöm inte att kommunicera med varandra, särskilt när terrängen är svår.

Se upp för för stora ryggsäckar som kan påverka lyftarmarna.

Var uppmärksam på passageraren, särskilt när det är kallt ute.

Lämna aldrig Joëlette och passageraren utan uppsikt när Joëlette står på stöden.

Kom ihåg : oftast faller man inte i svår terräng utan under de lugna stunder då alla tappat koncentrationen.



## 8 MONTAGE AV JOËLETTE

Joëlette är ihopfällbar för att ta mindre plats under transport.  
Följ steg 1 till 18 nedan för att montera ihop Joëlette inför en vandring.



1 : Ta bort bältet och vik undan nackstödet



2 : Ta bort axeln och låsstiftet och vrid hjulet



3 : Håll hjulet på plats, tryck igenom axeln och säkra den med låsstiftet



4 : Ta bort fotstödet låsstift och axel



5 : Sänk fotstödet maximalt med handtaget



6 : Placera fästet i skårorna medan du trycker på rören för att underlätta införandet





7 : Tryck igenom axeln och lås fast den



8 : Drag ut och vrid låshandtaget horisontellt



9 : Vänd runt Joëletten och ställ den på sina stöd



10 : Håll in det lilla handtaget och vik upp lyftarmarna.  
Fäll upp ryggstödet tills lyftarmarna får kontakt med hjulet.



11 : Skruva fast armstödet mot ryggstödet.



12 : Skruva fast armstödet mot sätet.  
Drag åt skruvarna ordentligt.  
Upprepa steg 11 och 12 på andra sidan.





13 : Placera den stoppade sitsen på sätet.



14 : Drag flärpen bakåt och snäpp fast den.



15 : Placera dynan på ryggstödet och lås fast den.



16 : Fäll ut lyftarmarna och tryck försiktigt in dem i rören.



17 : Lås fast lyftarmarna med stift och bygel.



18 : Er Joelette är klar för användning !

För att fälla ihop Joëlette, följ stegen ovan i omvänd ordning.

## 9 TRANSPORTVÄSKA

Som tillval finns en kraftig transportväska som rymmer Joëlette och dess delar.



1 : Placera ramen i väskan



2 : Lägg ett armstöd på vardera sida av ramen



3 : Placera fotstödet vid nackstödet



4 : Placera sitsen under hjulet och ryggkudden ovanför hjulet.

5 : Drag upp sidorna och stäng påsen





## 10 UNDERHÅLL

Med underhåll avses alla uppgifter som utförs för att säkerställa att Joëlette är i gott skick och redo att användas som avsett. Underhåll omfattar olika områden, till exempel daglig vård och städning, inspektioner, reparationer och reovering.

Åtminstone en gång om året bör ni göra en grundlig kontroll av Joëlette oavsett hur ofta den används. Om ni använder Joëlette regelbundet mer än en gång i veckan, är det nödvändigt med ytterligare kontroller.

Underhållet är ungefär detsamma som för en mountainbike.

Ni bör kontrollera:

- Däckens lufttryck.
- Bromssystemet, särskilt bromsbeläggens tillstånd.
- Låsstiften, att de finns och är oskadda
- Tillräcklig oljenivå i hydraulsystemet.

Vi rekommenderar att det alltid medföljer en reparationssats för punktering av däck.

Om hjulet demonteras ska bromsbeläggen spärras med medföljande plastskydd.

En cykelreparatör eller kunnig person kan utföra underhållet

### 10.1 Rengöring

Tänk på följande när ni rengör Joëlette:

- Använd endast en fuktig trasa och mildt rengöringsmedel.
- Använd inte slipmedel eller skurmedel.
- Använd inte högtryckstvätt.

### 10.2 Desinfektion

Att spraya och torka av Joëlette med ett desinfekterande medel är tillåtet.

## 11 INSPEKTION

Följande tabeller visar de två typer av inspektioner som ska utföras och deras intervall.

### 11.1 Före varje användning

Föremål	Inspektion	Åtgärd
Hjullåsningssystem	Säkerställ att låshandtaget rör sig utan att fastna och att hjulet låser ordentligt. För att testa detta, bromsa medan ni trycker vagnen framåt.	Kontakta tillverkaren eller ÅF.
	Säkerställ att låsmekanismen sitter ordentligt fast.	Skruva fast mekanismen med 12 och 19mm ringnycklar.
Hjul / Däck	Kontrollera att däcket inte har några skador.	Kontakta en cykelreparatör.
	Kontrollera att däcket är pumpat till rätt tryck.	Pumpa däcket till rätt tryck (se kapitel : Teknisk Data)  För reparation av innerslang, kontakta en cykelreparatör.
Låssprintar	Se till att alla låssprintar finns och att de är oskadda.	Kontakta tillverkaren eller ÅF.
Bältssystem	Kontrollera att låsningen av midjebältet fungerar perfekt.	Kontakta tillverkaren eller ÅF.
	Kontrollera bältets sömmar och infästningar.	Kontakta tillverkaren eller ÅF.

## 11.2 Återkommande

Föremål	Inspektion	Åtgärd
Alla stoppade delar	Kontrollera om det finns skador eller slitage på alla stoppade delar.	Kontakta tillverkaren eller ÅF.
	Kontrollera knapparna som håller fast sittdynan.	Kontakta tillverkaren eller ÅF.
	Kontrollera kardborrebandet som håller fast ryggstödet.	Kontakta tillverkaren eller ÅF.
Bromsar	Säkerställ att bromsbeläggen inte är allför slitna.	Kontakta en cykelreparatör.
	Säkerställ att bromsskivan inte är allför sliten. (tunn/repig)	Kontakta en cykelreparatör.
	Kontrollera att bromsvätskenivån i huvudcyllindern är tillräcklig.	Kontakta en cykelreparatör.

## 12 LÅNGTIDSFÖRVARING

Om din Joëlette inte används under en längre tid måste den förberedas för lagring.

- Pumpa upp däcket till strax över rekommenderat tryck.
- Förvara Joëlette i en torr, väl ventilerad miljö skyddad från yttre påverkan.
- Vi rekommenderar förvaring vid en temperatur på 15° C.
- Undvik heta och kalla ytterligheter vid förvaring för att säkerställa en lång livslängd för produkten.
- Tillåtet temperaturområde för lagring av Joëlette är -40° upp till 65° C.



## 13 TEKNISKA DATA

Den tekniska informationen nedan gäller för en standardkonfiguration av Joëlette.

Observera att uppmätta värden i vissa fall kan variera upp till  $\pm 10$  mm.

<b>Tillåtna drifts- och lagringsvillkor</b>	
Temperaturområde för drift	-25° C till +50° C
Rekommenderad lagringstemperatur	+15°C
Temperaturområde för lagring	-40° C till +65° C


<b>Hjul / Däck</b>	
Däckdimension	20" x 2,25"
Däcktryck	Rekommenderat däcktryck i Bar, Kpa eller Psi står angivet på sidan av däckets. Om mer än ett värde finns angivet gäller det lägsta.

<b>Mått</b>	
Total höjd	1222 mm (exkl. nackstöd)
Total bredd	637 mm
Total längd	2400 mm
Sitthöjd	792 mm
Sitthöjd påstigning	503 mm
Sätets bredd	477 mm
Sätets djup	382 mm
Sätets tjocklek (min)	71 mm
Ryggstödet höjd	481 mm
Ryggstödet tjocklek (min)	55 mm
Ryggstödet vinkel (ställbart)	89,5° / 99° / 110,5°
Sätets vinkel	8°
Armstödet höjd	171 mm
Armstödet längd	305 mm
Avstånd fotplatta till säte	200 till 450 mm
Markfrigång	288 mm
Hopfälld för förvaring/transport	970 x 637 x 512 mm

<b>Vikt</b>	
Klassisk Joëlette	27 kg

<b>Belastning</b>	
Maxlast	120 kg

14 SPRÄNGSKISS

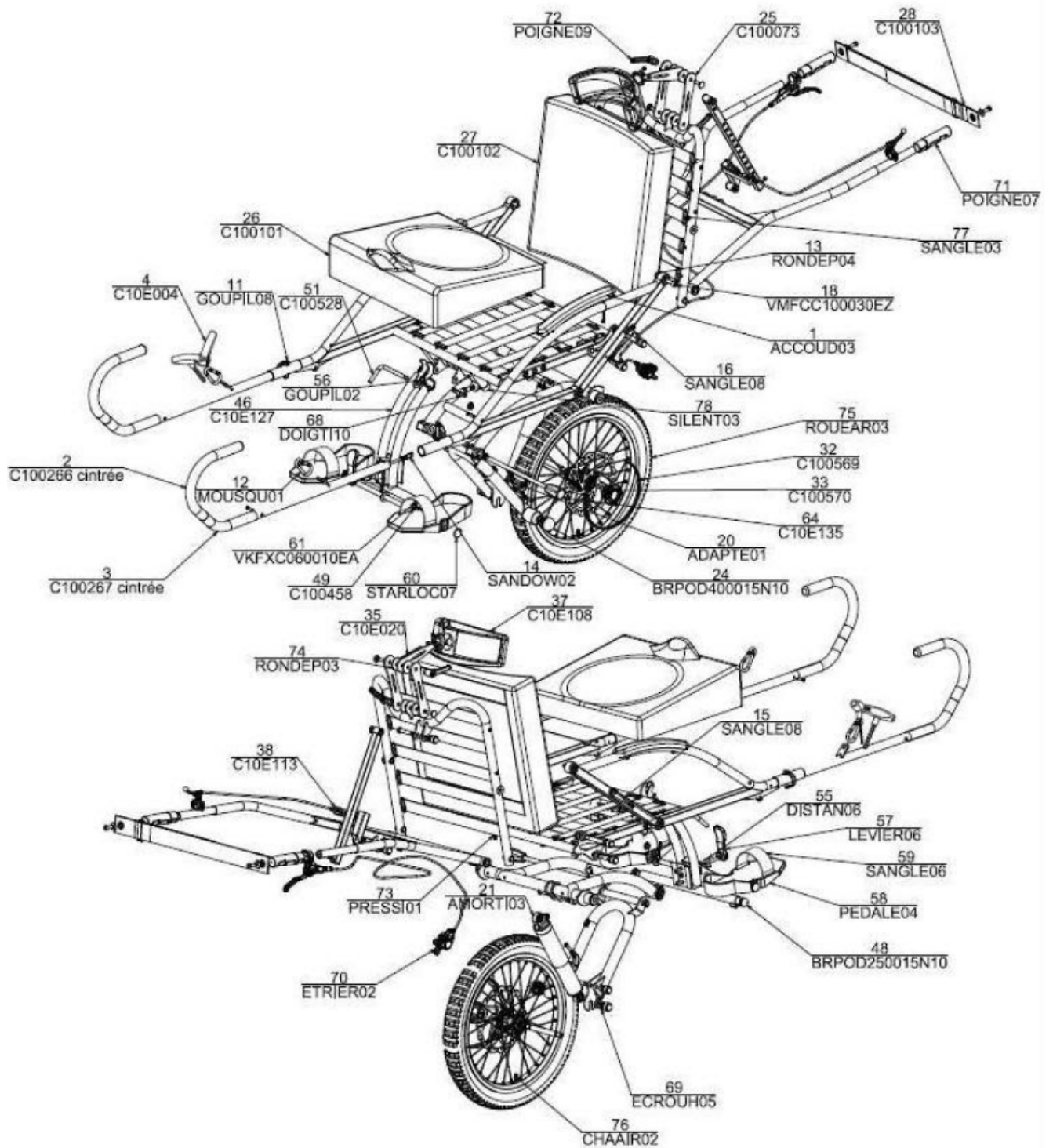

## 15 GARANTI

Joëlette levereras med 2 års garanti.

Joëlette måste användas i strikt överensstämmelse med de krav gällande användning, underhåll och service som anges i detta dokument.

### **Risk för olycka och förlust av garanti vid otillräckligt underhåll (sidan 24).**

Av säkerhetsskäl och för att undvika olyckor till följd av obemärkt slitage är det viktigt att Joëletten genomgår återkommande inspektioner (minst en gång varje år) under normala driftförhållanden.

I samband med varje användning av Joëlette är det lämpligt att utföra en enklare kontroll av bromsar, tillbehör och rörliga delar.